

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Комплектация.....	3
1.4 Устройство и работа.....	3
1.5 Маркировка.....	4
1.6 Упаковка.....	4
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ..	4
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	4
2.2 Подготовка к работе.....	5
2.3 Порядок работы.....	5
2.4 Возможные неисправности и рекомендации по действиям при их возникновении.....	6
2.5 Парафино- и озокеритолечение.....	6
2.5.1 Îñíîáíûá ïðåäâåðü.....	6
2.5.2 Ëââáíé ýðàâè.....	7
2.5.3 Òâñíèà íàâðåâåñàèè.....	7
2.5.4 Îñíîáíûá ïàðàâèè íàâðåâåñàèè.....	7
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ.....	8
3.1 Содержание и обслуживание.....	8
3.2 Меры безопасности.....	8
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	8
5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.....	10
7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11

Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках парафинонагревателя «Каскад» и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

К работе с парафинонагревателем «Каскад» допускаются лица, изучившие Руководство по эксплуатации, и прошедшие местный инструктаж по технике безопасности труда по работе с электронагревательными приборами.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ

1.1 Назначение парафинонагревателя

Парафинонагреватель «Каскад» применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.


1.2 Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	220 В
Потребляемая мощность (не более).....	400 ВА
Масса.....	6 кг
Диапазон температуры нагрева.....	от 40 до 85 С
Ёмкость бака.....	7 л
Габаритные размеры.....	300х300х350 мм

1.3 Комплектация

Парафинонагреватель «Каскад»	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 экз.

1.4 Устройство и работа парафинонагревателя

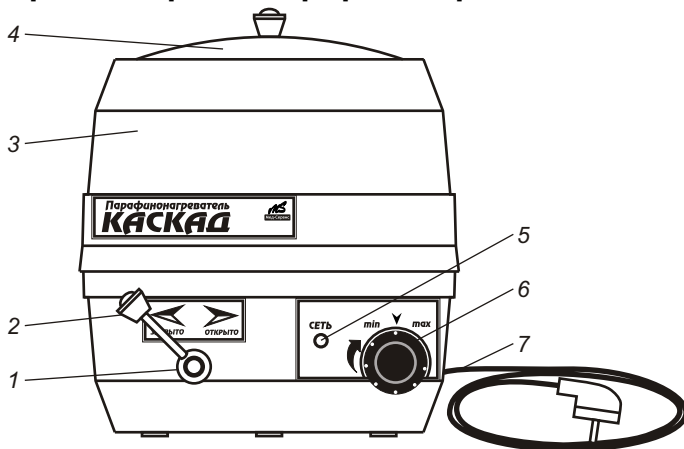

1 - кран, 2 - ручка крана, 3 - наружный корпус, 4 - крышка, 5 - лампа индикации "Сеть", 6 - ручка терморегулятора, 7 - сетевой шнур.

Рисунок 1. Устройство парафинонагревателя

Парафинонагреватель «Каскад» (рис. 1) состоит из алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из термостойкого высокопрочного пластика. Слив парафина из бака производится с помощью крана. Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью ручки терморегулятора. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры от 40 до 85°С. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой.

1.5 Маркировка

На корпусе парафинонагревателя в местах, оговоренных конструкторской документацией, находятся надписи: наименование предприятия-изготовителя, наименование изделия, заводской номер, год выпуска, требования к эл. сети, положение ручки крана, положение ручки терморегулятора, обозначение лампы индикации “Сеть”.

Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

Упаковка парафинонагревателя производится в коробку из гофрированного картона, обеспечивает сохранность изделия и безопасность погрузочно-разгрузочных работ.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАФИНОНАГРЕВАТЕЛЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

- ☑ При подсоединении и отсоединении сетевого шнура терморегулятор должен быть в отключенном состоянии.
- ☑ Не включайте парафинонагреватель без парафина.
- ☑ Не пытайтесь слить парафин до его полного расплавления во всем объеме бака.
- ☑ Не сливайте парафин через край бака.
- ☑ Расплавленный парафин не должен попадать внутрь устройства, поэтому для смачивания салфеток и кистей используйте кюветы. Если все же есть необходимость смачивать салфетки (или кисти) непосредственно в парафинонагревателе, необходимо закрыть резиновое уплотнение между алюминиевым баком и корпусом парафинонагревателя фольгой.

2.2 Подготовка к работе

Парафинонагреватель для работы освободите от заводской упаковки и поместите на ровную устойчивую площадку с диэлектрическим покрытием. Внешним осмотром убедитесь в исправности корпуса и сетевого шнура.

2.3 Порядок работы

- 1) Поместите в бак парафинонагревателя парафин, озокерит или их смесь таким образом, чтобы бак был заполнен не менее 3/4 от общего объема. Для ускорения нагрева и равномерного распределения, желательно загружать парафин небольшими кусками (не более 100 100 100 мм).
- 2) Закройте бак крышкой.
- 3) Подключите парафинонагреватель к сети. При этом загорится лампа индикации “Сеть”, расположенная на правой стороне парафинонагревателя.
- 4) Установите требуемую температуру нагрева ручкой терморегулятора, расположенной справа на передней панели парафинонагревателя. Для ускорения нагрева можно установить терморегулятор на максимальную температуру (85°C). Кроме того, ускорить нагрев можно периодическим перемешиванием нагреваемого материала деревянной лопаткой.
- 5) Через 60-90 минут (в зависимости от количества нагреваемого материала) установится режим, соответствующий выбранной температуре. Нагреватели при этом автоматически отключатся. Следует отметить, что и после автоматического отключения нагревателей, смесь некоторое время нагревается по инерции, что приводит к перебегу на 5-8°C. Когда смесь остынет до установленной терморегулятором температуры, нагреватели автоматически включатся. При остывании также происходит кратковременный перебег на 5-8 С ниже установленной температуры.
- 6) Для стерилизации парафина установите ручку терморегулятора на максимальную температуру (85 С Рабочая смесь должна расплавиться, разогреться до максимальной температуры. Для достаточной стерилизации, парафинонагреватель должен оставаться в установившемся режиме не менее 40-60 минут. Режимы стерилизации описаны в п. 2.5.3 Руководства по эксплуатации (Техника нагрева и стерилизации).
- 7) **Слив парафина производится только через кран. Слив через край приведет к поломке парафинонагревателя.**
- 8) Управление краном осуществляется с помощью ручки, имеющей два положения “Открыто” - “Закрыто”, обозначенные соответствующими надписями.
- 9) До полного расплавления парафина во всем объеме бака, ручка должна находиться в положении “Закрыто”.

- 10) При необходимости слива парафина в кювету плавно поверните ручку крана по часовой стрелке в положение “Открыто”.
- 11) После слива верните ручку крана в положение “Закрыто” плавным поворотом против часовой стрелки.
- 12) После окончания работы отключите терморегулятор поворотом ручки против часовой стрелки до совпадения стрелки - указателя со значением 0 и отсоедините сетевой шнур от розетки.

2.4 Возможные неисправности и рекомендации по действиям при их возникновении

№ пп	Описание неисправности	Причина неисправности	Метод устранения неисправности
1	Парафин не сливается через кран	Применение засоренного парафина	Прочистить кран тонкой проволокой. Не применять “грязный” парафин.
2	При включении прибора в сеть нагрев бака не производится		Если напряжение в сети в пределах нормы, обращайтесь в сервисную службу. Телефон для консультаций (343) 331-93-15

2.5 Парафино- и озокеритолечение

2.5.1 Основные определения

Парафин - смесь высокомолекулярных углеводородов, получаемая при перегонке нефти. Представляет собой белую массу крупнокристаллической структуры. Температура плавления: 45-52°C, температура кипения 350°C. Парафин получил широкое применение в лечебной практике, благодаря своим физическим особенностям весьма малой теплопроводности, большой теплоемкости, скрытой теплоте плавления, равной 35 кал, а также компрессионному действию.

Озокерит (горный воск) сложное вещество, состоящее в основном из твердых углеводородов (церезина, парафина), минеральных масел и смол. Озокериты с большой примесью смол имеют черный цвет. Для лечебных целей применяют «Медицинский озокерит», или озокерит-стандарт, из которого полностью удалена вода, щелочи и кислоты. Температура плавления озокерита 62-68°C. Лечебное действие озокерита основано на его физических и химических особенностях. Он обладает большой теплоемкостью и весьма

малой теплопроводностью. Немалое значение имеют и химические вещества, содержащиеся в озокерите.

2.5.2 Лечебный эффект

Лечебный эффект при местном применении парафина заключается в его рассасывающем, болеутоляющем и антиспастическом действии. Особенно благоприятное действие оказывает парафин на кожу. Под влиянием парафинолечения улучшается крово- и лимфообращение, повышается тканевый обмен. Улучшение питания и трофики кожи ведет к тому, что она становится эластичной и нежной.

Лечебный эффект при лечении озокеритом во многом сходен с результатами лечения парафином, но выражен более резко. Под влиянием нагретого озокерита медленно, но прогрессивно увеличивается расширение капиллярной сети кожи, раскрываются запасные капилляры, усиливается крово- и лимфообращение и устраняются застойные явления.

2.5.3 Техника нагрева и стерилизации

Парафин следует нагревать до температуры 96-100°C. Стерилизация парафина производится при температуре от 100 до 108°C в течении 20 минут или при температуре от 85-90°C в течении 40 минут. После употребления парафин следует промыть под сильной струей воды и тщательно просушить. При повторном применении парафина к нему нужно прибавлять 10-15% свежего и обязательно производить стерилизацию смеси.

Озокерит нагревают до температуры 96-100°C. Стерилизация озокерита производится при температуре от 100 до 108°C в течение получаса или при температуре 85-90°C в течение 60 минут. При повторном применении уже использованного озокерита его стерилизуют и добавляют 15% не бывшего в употреблении озокерита.

2.5.4 Основные методики наложения парафина

Кюветно-аппликационная методика. Расплавленный парафин разливают в кюветы (глубина 5 см), выложенные медицинской клеенкой, выступающей за ее края на 5 см (размеры кюветы должны соответствовать площади наложения парафина). Толщина слоя парафина в кювете должна быть 1 - 2 см. Застывший, но еще мягкий парафин вынимают из кюветы вместе с клеенкой и накладывают на участок тела, подлежащий воздействию, а затем все покрывают одеялом или специально сделанным для этой цели ватником.

Методика насаивания. Расплавленный парафин сливают в кювету и дают остыть до 55-65 С. Расплавленный парафин температуры 55 - 65°C наносят на соответствующую поверхность кожи плоской малярной кистью слоем 1-2 см. Затем участок тела, подвергающийся воздействию парафином, покрывают компрессной клеенкой или вощеной бумагой и укутывают одеялом или специальными ватниками. Температура такой аппликации около 50°C.

Салфетно-аппликационная методика. После нанесения на кожу по методике наплаивания 1 - 2 слоев парафина (до толщины 0,5 см) накладывают марлевую салфетку, сложенную в 8 - 10 слоев, смоченную в парафине температуры 65 - 70°C и слегка отжатую; салфетку покрывают клеенкой и затем одеялом или ватником.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРАФИОНАГРЕВАТЕЛЯ

3.1 Содержание и обслуживание

Рабочие поверхности парафионагревателя, соприкасающиеся с парафином и его наружные поверхности, допускается промывать и дезинфицировать по ОСТ 42-21-2 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-88 или 1%-ным раствором хлорамина по ОСТ 6-01-76.

Запрещается окуна́ть парафионагреватель в жидкость при дезинфекции. Запрещается выливать воду после промывки через край парафионагревателя.

3.2 Меры безопасности

- ☑ Категорически запрещается включать парафионагреватель в разобранном состоянии.
- ☑ Парафионагреватель должен использоваться в помещениях, имеющих трехпроводную электрическую сеть. Подключение к двухпроводной сети допускается при **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ** выполнении требований ГОСТ 12.2.025-88 в части заземления. В этом случае подключение к сети должно выполняться квалифицированным специалистом.
- ☑ Меры пожарной безопасности:
 - не оставляйте парафионагреватель на длительное время без присмотра во включенном состоянии;
 - после окончания работы обесточьте парафионагреватель, вынув вилку шнура из розетки сети;
 - не ставьте устройство около отопительной системы.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Парафионагреватель "Каскад" разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Парафионагреватель следует перемещать в вертикальном положении, защищать от воздействия влаги, оберегать от ударов, механических нагрузок и повреждений.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие парафионагревателя требованиям технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных Руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления устройства.

В течение гарантийного срока все выявленные потребителем неисправности, происшедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно предприятием - изготовителем или предприятием гарантийного ремонта.

Изготовитель не несет ответственности, и гарантийный ремонт не производится в случае:

- ☑ не соблюдения потребителем (торгующей организацией) правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации;
- ☑ разборку или ремонта устройства потребителем или лицами, не уполномоченными на это, кроме случаев, оговоренных Руководством по эксплуатации;
- ☑ эксплуатации устройства при напряжении сети свыше 242 В или ниже 198 В.

В случае неисправности парафионагревателя во время гарантийного срока эксплуатации или хранения, а также при обнаружении некомплектности при получении парафионагревателя потребитель направляет в адрес предприятия-изготовителя акт, в котором должны быть указаны:

- ☑ заводской номер и год выпуска парафионагревателя;
- ☑ время хранения (в случае если прибор не был в эксплуатации);
- ☑ количество часов работы прибора до возникновения неисправности;
- ☑ вид неисправности (или недостающие позиции в соответствии с разделом "Комплектация");
- ☑ адрес потребителя;
- ☑ номер контактного телефона потребителя.

Парафионагреватель отправляется предприятию-изготовителю на ремонт или замену в соответствии с разделом "Комплектация" настоящего паспорта.

При согласовании с предприятием-изготовителем ремонт может быть произведен ремонтным предприятием.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Парафинонагреватель “Каскад” соответствует конструкторской документации МС 120.000 СБ и ТУ 9452-001-39915307-96 и признан годным для эксплуатации.

№ прибора	Дата выпуска	Штамп ОТК

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

ПРИНЯТ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонтным предприятием _____
(наименование, адрес)

Подпись руководителя
ремонтного предприятия _____
М.П. _____ (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Произведен _____ ремонт _____
(гарантийный, текущий) (дата)

предприятием _____

Содержание неисправности _____

Подпись руководителя
ремонтного предприятия _____
М.П. _____ (расшифровка подписи)