




**Инструкция по подключению тонометра  
UA-911BT-C  
к мобильному приложению **A&D Connect**  
на платформе **iOS**  
и сайту **telemedicine-and.ru****






1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (App Store).....	3
2. Включение Bluetooth .....	4
3. Начало работы с A&D Connect.....	5
4. Регистрация в мобильном приложении.....	6
5. Подключение устройства (Тонометр UA-911BT-C).....	7
6. Результаты работы прибора и приложения после измерений.....	8
7. Главное окно приложения A&D Connect.....	9
8. Установка напоминаний и экспорт данных.....	10
9. Как найти сайт telemedicine-and.ru в интернете?.....	11
10. Карта сайта telemedicine-and.ru.....	12
11. Как зарегистрироваться на сайте.....	13
12. Медкарта.....	14

# 1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (App Store)

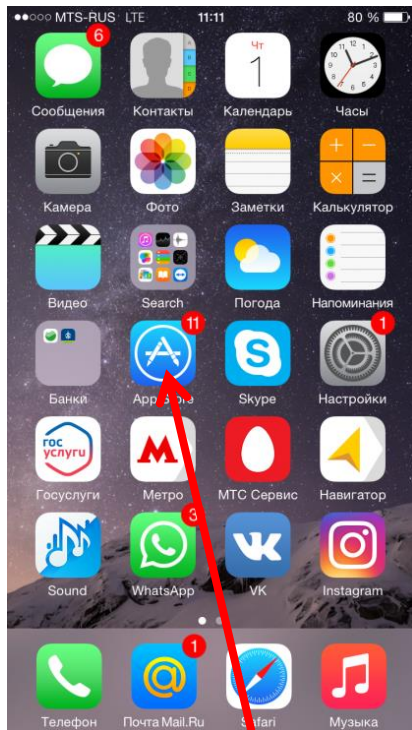


Открываем приложение App Store

1

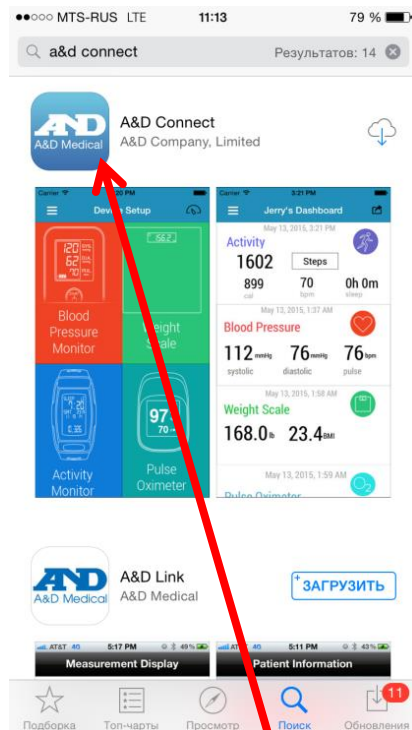


В поисковой строке набираем название программы A&D Connect. Нажимаем на иконку приложения A&D Connect

2

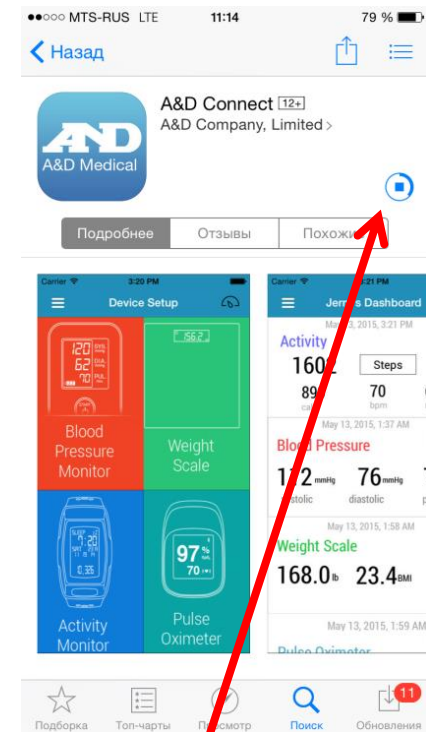


В окне приложения нажимаем кнопку «Загрузить» и «Установить» и ожидаем скачивание и установку программы пока не появится кнопка «Открыть». После установки нажимаем кнопку «Домой»

3

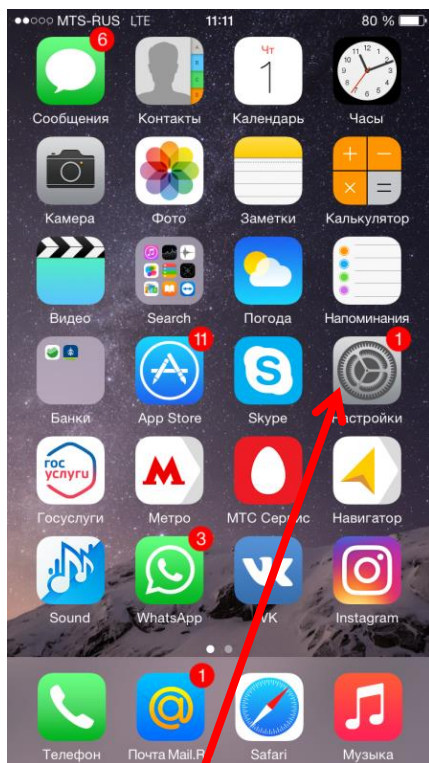


Заходим в раздел «Настройки»

1

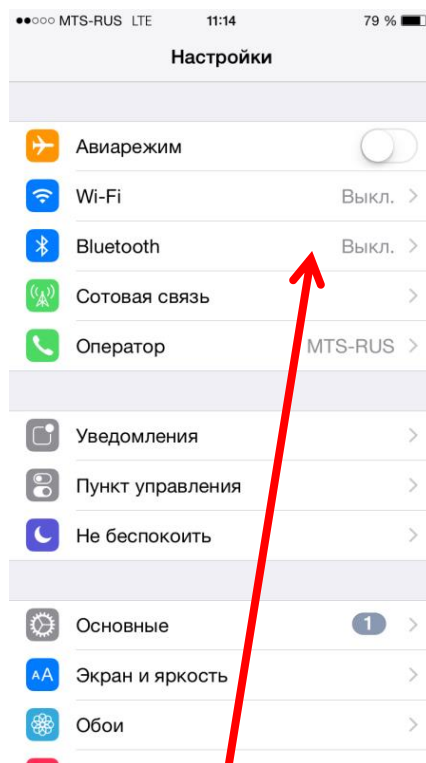


Выбираем пункт Bluetooth

2

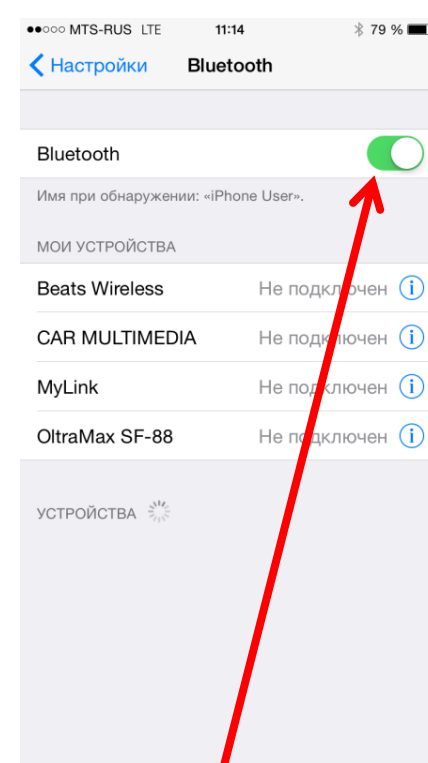


Делаем индикатор Bluetooth активным. После установки нажимаем кнопку «Домой»

3

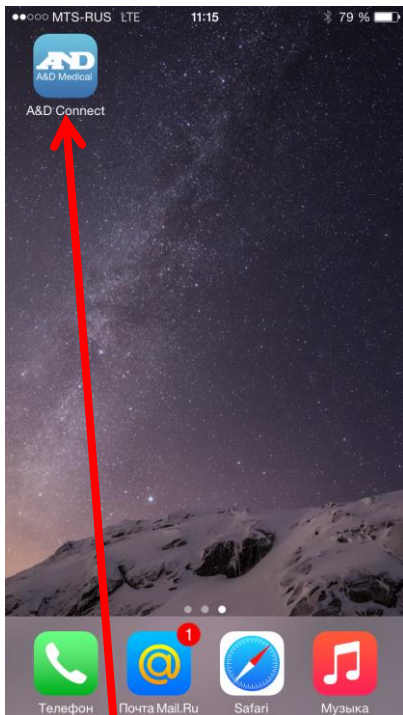


Открываем приложение A&D Connect

1

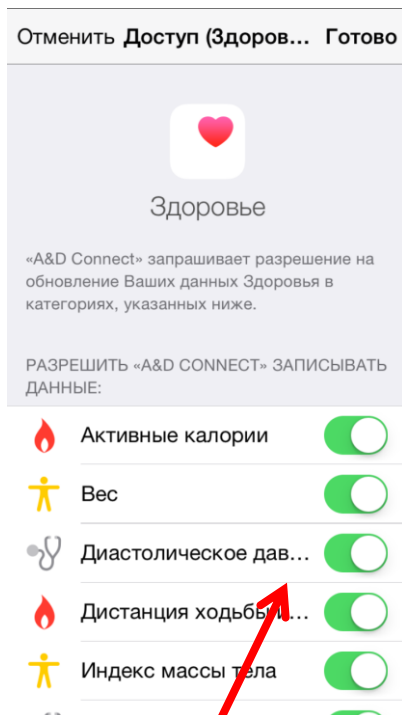

Приложение «Здоровье» (только на версиях iOS 8 и выше) запросит Вас о возможности синхронизации данных с приложением A&D Connect. Отметьте необходимые Вам данные (данное окно открывается при первом запуске программы) и нажмите «Готово»

2



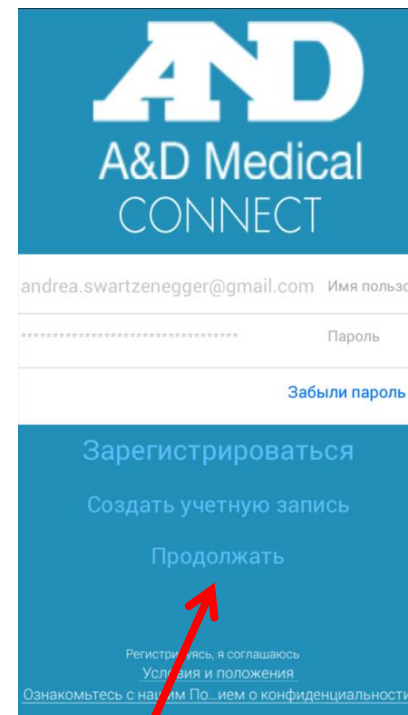


После совершенных шагов Вы окажетесь на главном окне приложения

3




# 4. Регистрация в мобильном приложении

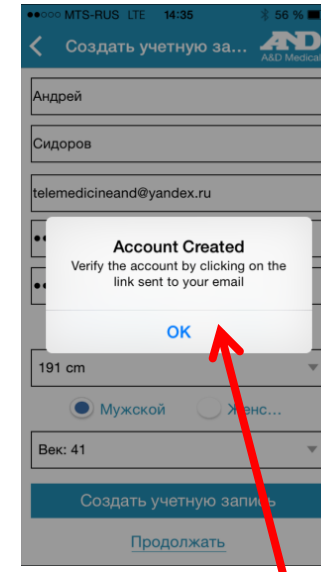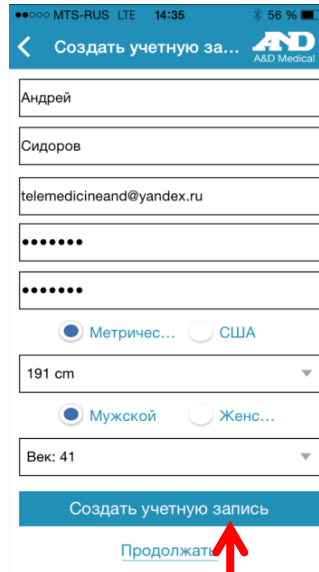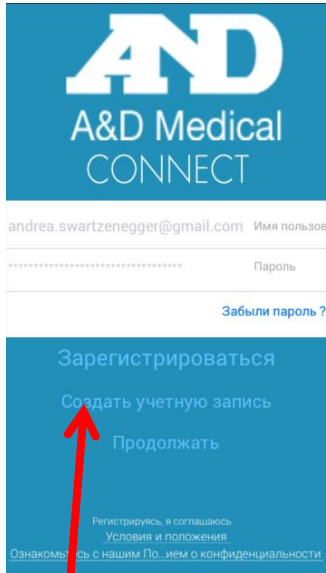


1 Если у Вас нет учетной записи, нажмите «Создать учетную запись». Также можно использовать приложение без учетной записи нажав кнопку «Продолжить»

2 Заполните все необходимые поля и нажмите внизу экрана «Создать учетную запись»

3 В случае успешного заполнения полей на Ваш почтовый адрес будет отправлено письмо для подтверждения Вашего аккаунта

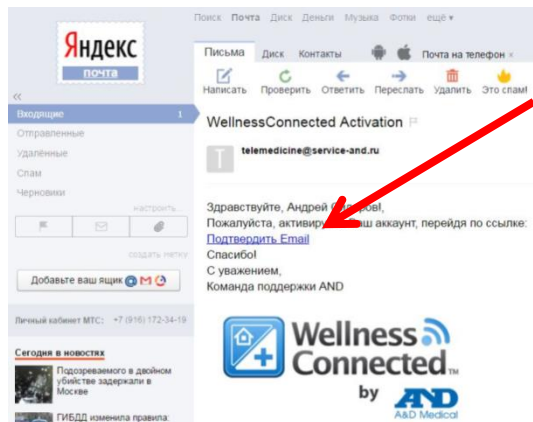


4 На Ваш почтовый ящик придет письмо от [telemedicine@service-and.ru](mailto:telemedicine@service-and.ru) с подтверждением Вашего аккаунта. Нажмите на «Подтвердить Email»

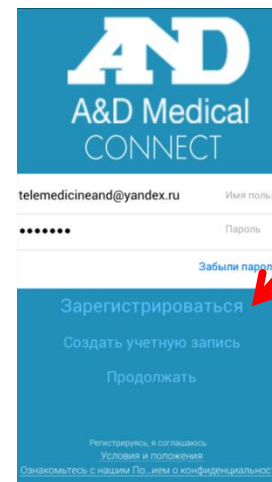

5 После успешной активации Вашего аккаунта Вы сможете использовать Ваше Имя пользователя (e-mail) и пароль для входа в учетную запись в мобильном приложении (кнопка Зарегистрироваться) и на сайте <http://telemedicine-and.ru/>

4


5

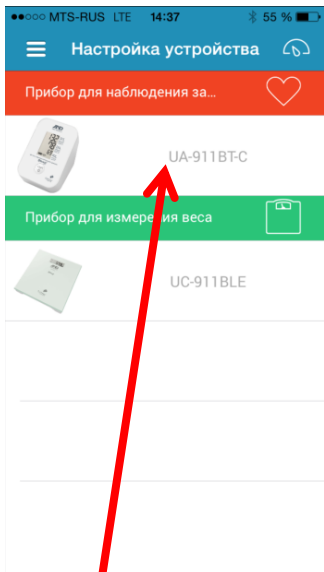


1 Подготовьте тонометр UA-911BT-C. Нажмите в приложении на кнопку «Прибор для измерения АД UA-911BT-C»




2 Убедитесь что Bluetooth включен на Вашем устройстве.

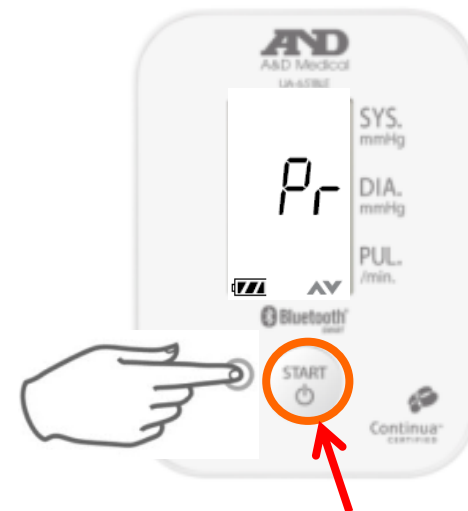

3 Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» пока не увидите Pr на экране тонометра.

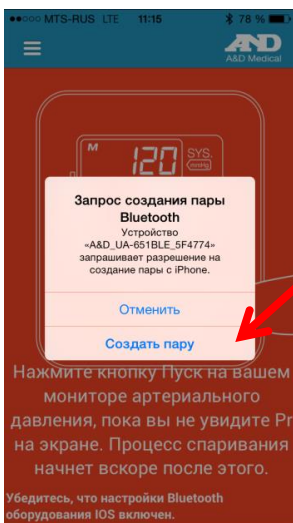


4 После соединения с тонометром появится окно «Запрос на соединение пары Bluetooth». Нажимаем кнопку «Создать пару»

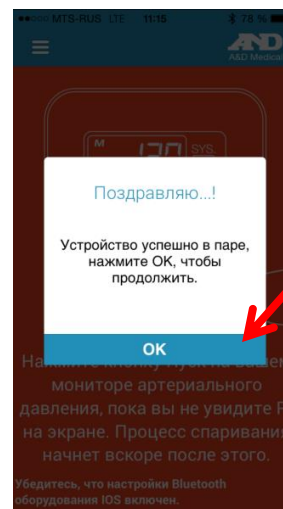

5 Устройство успешно подключено. Нажимаем ОК и переходим в «Панель управления». Дождитесь пока на экране тонометра появится символ «End»


## 6. Результаты работы прибора и приложения после измерений

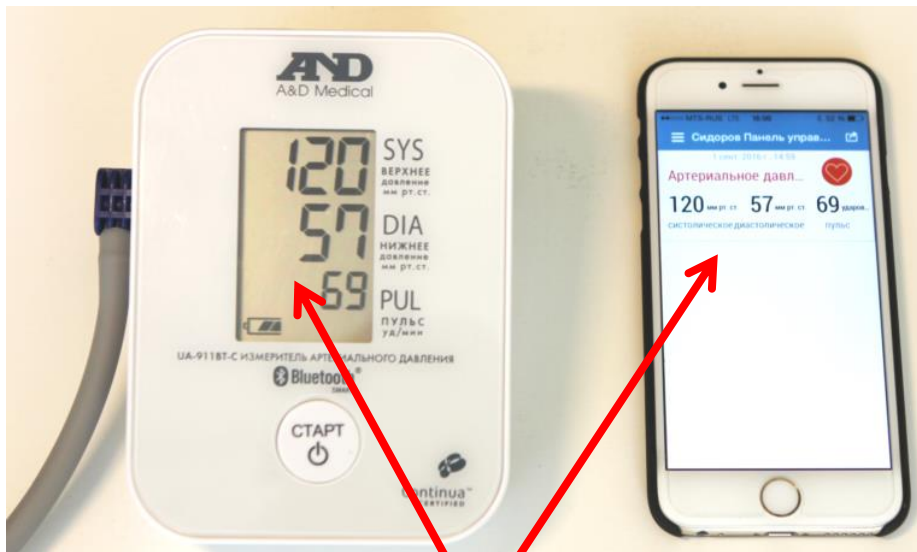

Откройте «Панель управления» на своем устройстве и сделайте измерение на тонометре. Данные передадутся на смартфон автоматически.

Если Вы зашли под своей учетной записью, то после измерения и передачи данных на смартфон Вы сможете посмотреть свои результаты в медкарте на сайте [telemedicine-and.ru](http://telemedicine-and.ru)

**Важно:** данные передаются только при открытом окне приложения «Панель управления»

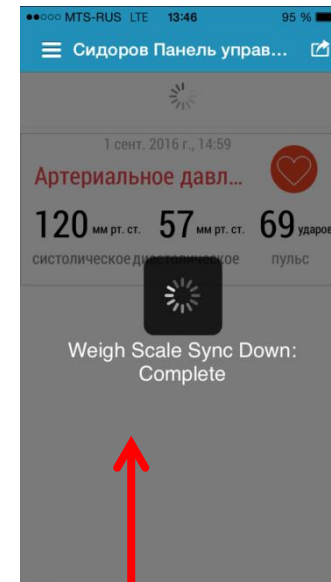

Для отправки данных в медкарту на панели управление необходимо смахнуть экран вниз, пока экран не потемнеет и начнет мигать круг. Через 1 минуту данные отобразятся в Вашей медкарте




## 7. Главное окно приложения A&D Connect

Учетная запись. Вы можете изменить свои данные.

В панели управления Вы можете получать данные с прибора, смотреть графики, статистику, формировать отчеты и экспортировать данные.


В Настройке устройства Вы можете подключить тонометр к своему смартфону

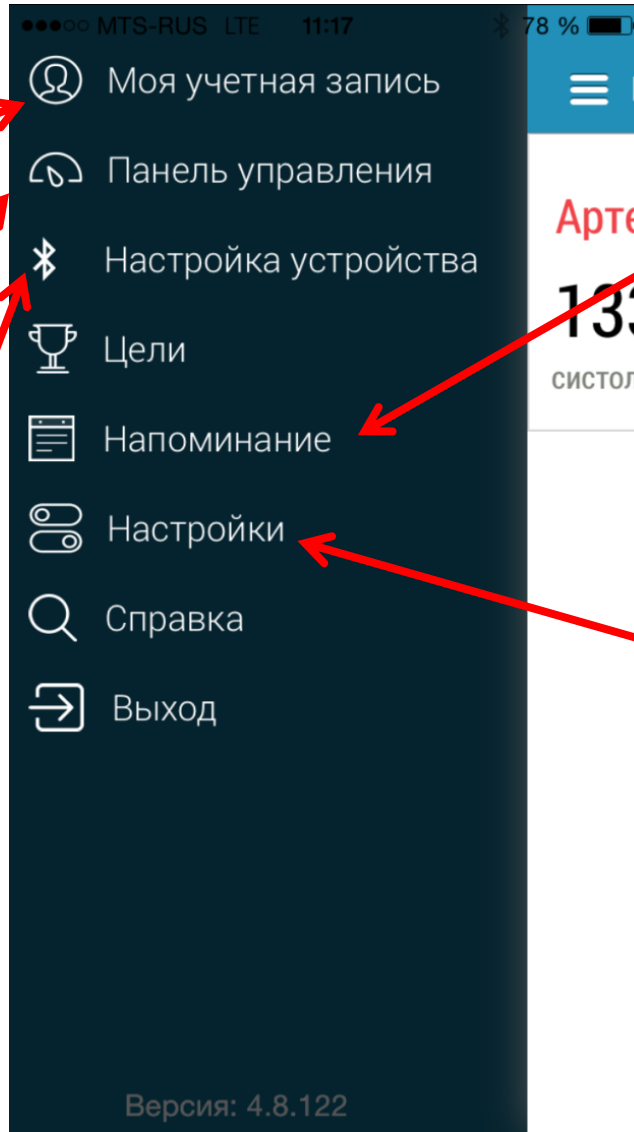


Установка напоминаний поможет Вам не забывать совершать измерения (более подробно на следующей странице)

В пункте Настройки Вы сможете подключить учетную запись Microsoft Health Vault и синхронизировать свои данные с личной страницей на портале.


# 8. Установка напоминаний и экспорт данных

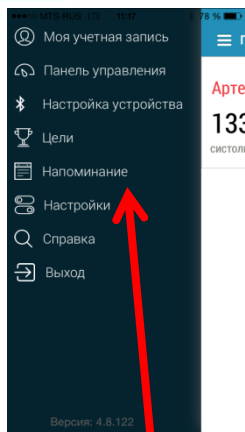


Нажмите в главном окне «Напоминания»

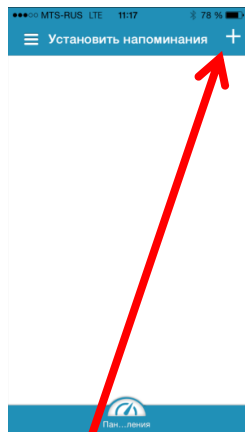


Чтобы добавить напоминание нажмите «+»

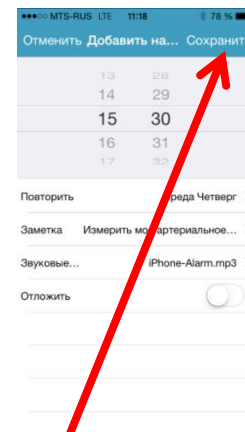


Настройте необходимые параметры и нажмите «Сохранить»

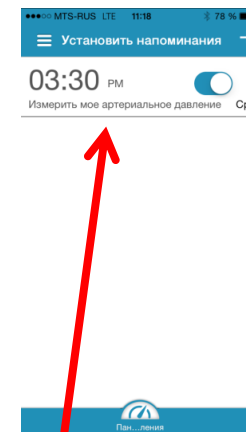


Напоминание добавлено

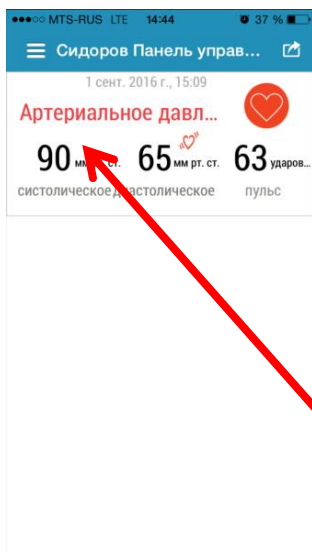

После измерения в «Панели управления» нажмите на красное сердце или надпись «Артериальное давление»

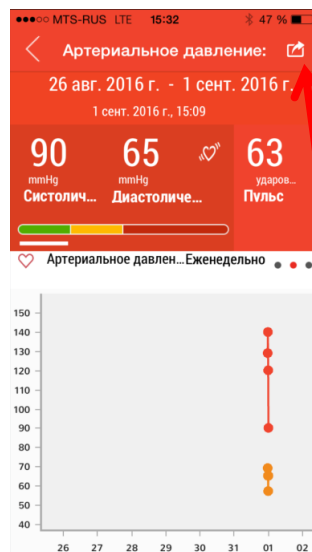


Для экспорта данных нажмите на значок в правом верхнем углу экрана

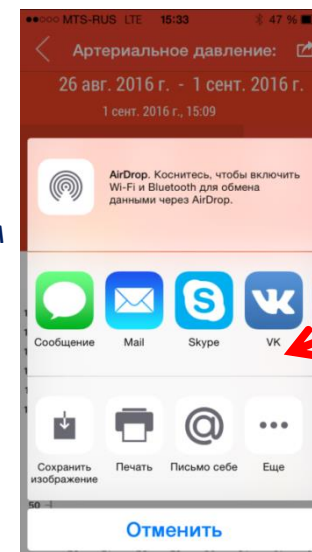

Выберите подходящий для Вас способ экспорта Ваших данных

Чтобы найти сайт по Телемедицине в интернете необходимо набрать в поисковой строке браузера – **telemedicine-and.ru**

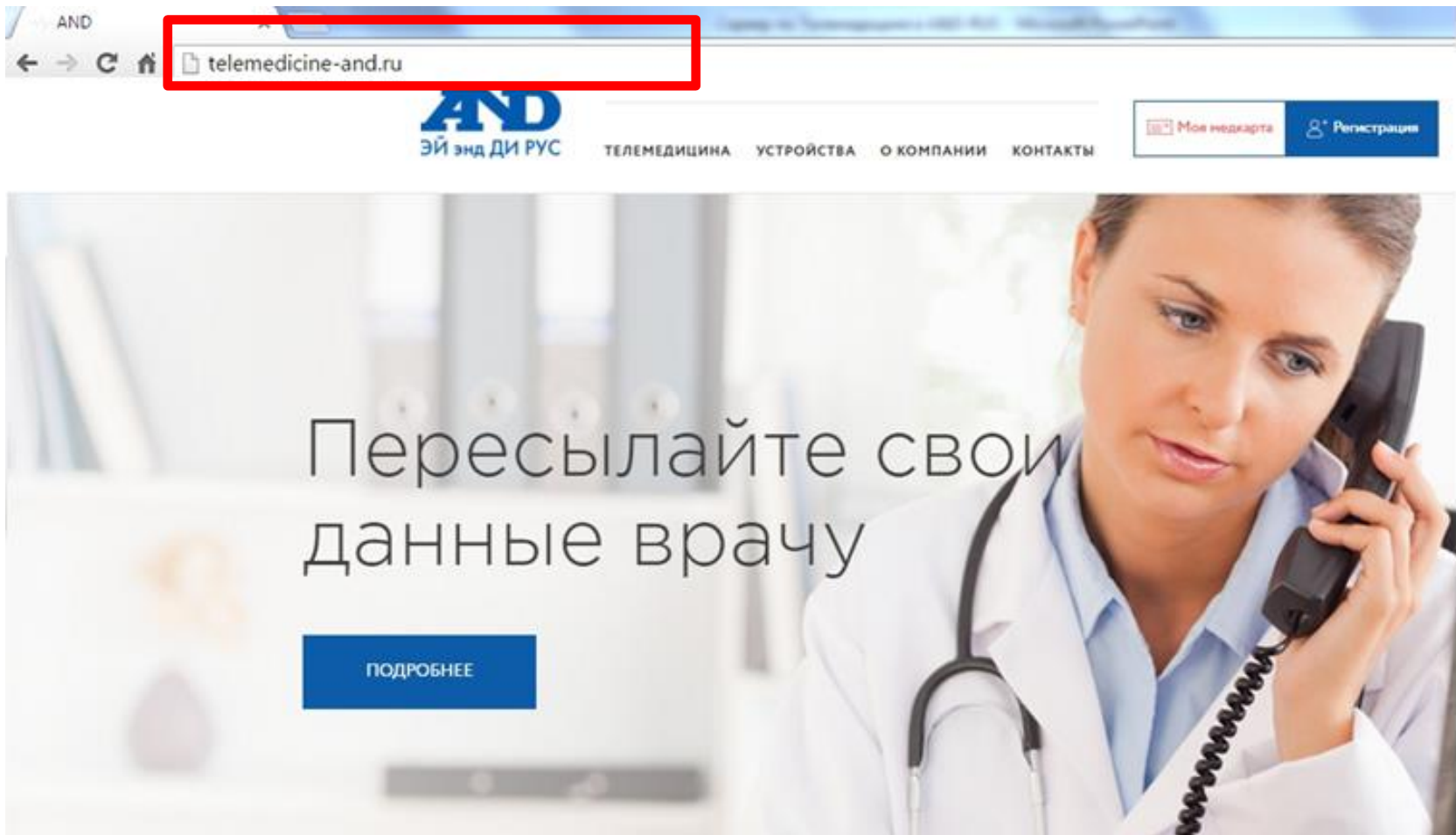



Информация о проекте  
Телемедицина

Телемедицинские  
устройства A&D

Информация о  
компании A&D-RUS


Контактная  
информация и  
форма «Задать  
вопрос»

Главная  
страница

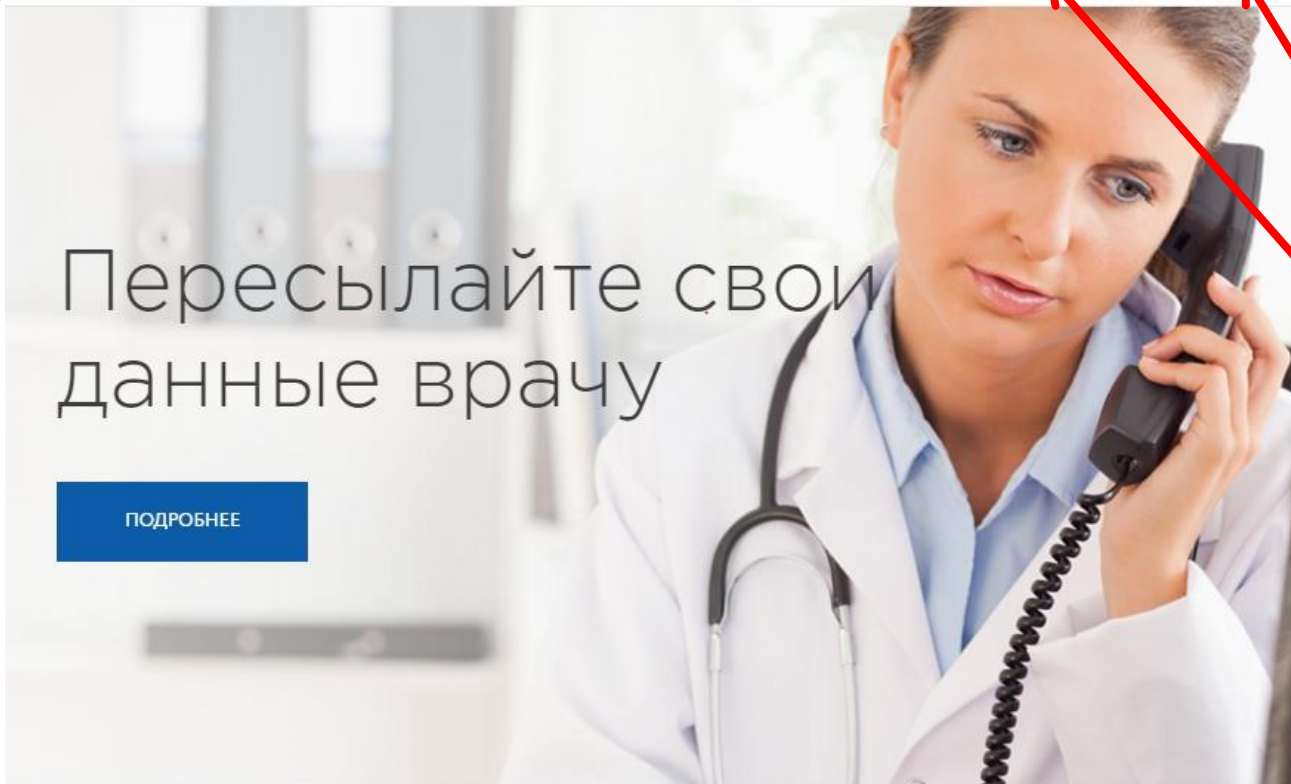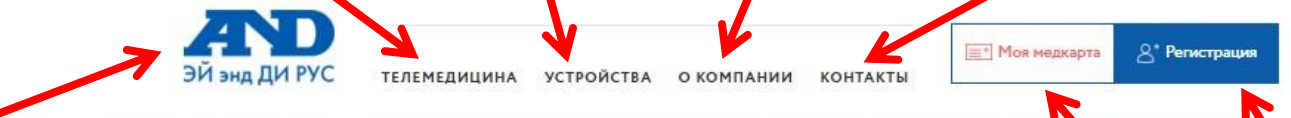


Регистрация  
в Медкарте

Вход в  
Медкарту

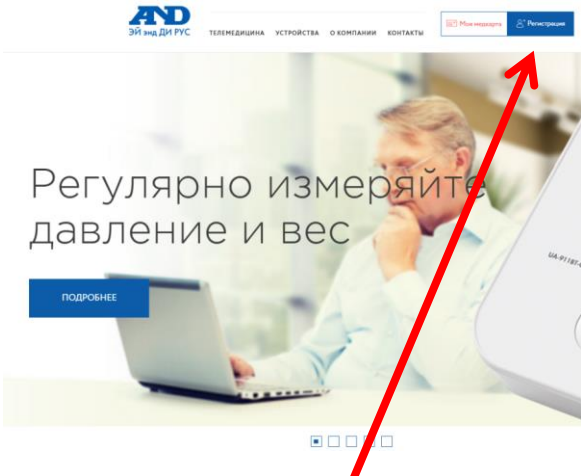


Зайдите на сайт [telemedicine-and.ru](https://telemedicine-and.ru) и выберите пункт «Регистрация»

1

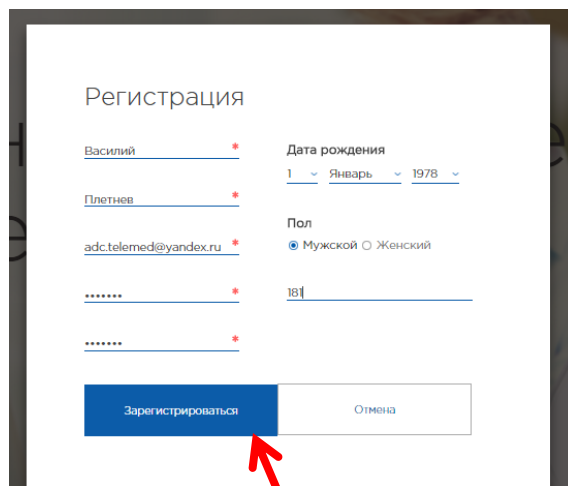


Заполните все необходимые поля и нажмите «Зарегистрироваться»

2

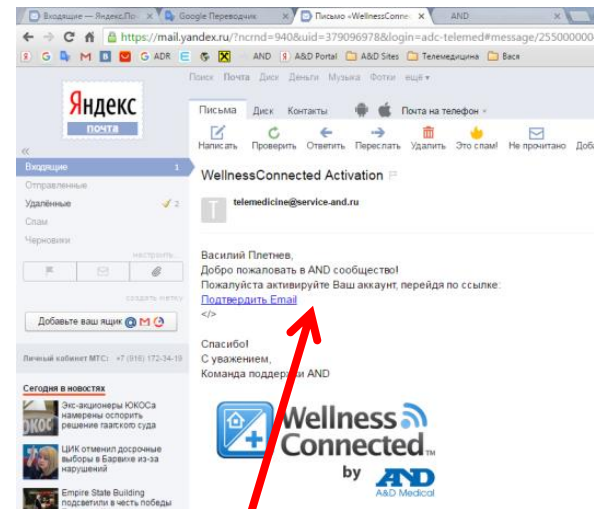

На указанную Вами почту придет уведомительное письмо об активировании Вашего аккаунта. Необходимо перейти по ссылке в письме и Ваш аккаунт будет активирован. Если письмо не пришло в Входящие, проверьте папку СПАМ

3

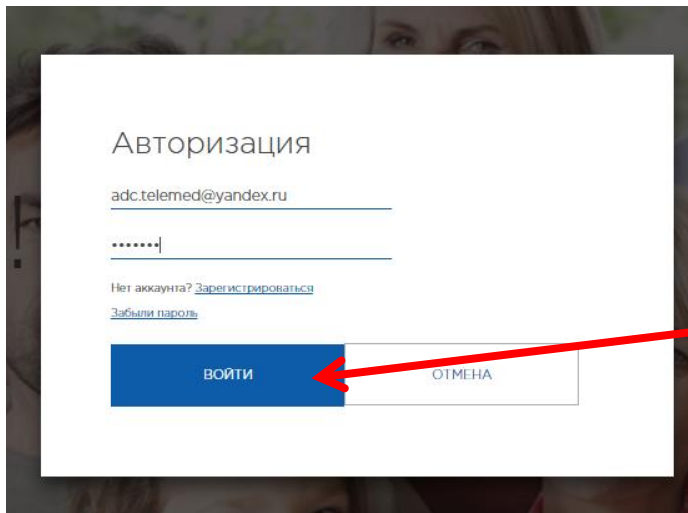

После активации аккаунта Вы сможете использовать свой логин и пароль для авторизации в мобильном приложении или на сайте

4



Добавить измерение вручную

Печать измерений

Формирование PDF отчета

Отправка отчета на почту

Просмотр динамики измерений на диаграмме

Анамнез – краткие сведения о Ваших последних измерениях

Данные об измерениях артериального давления

Данные о весе

Данные Вашего профиля

Статистика Ваших измерений

AND  
ЭЙ энд Ди РУС

ТЕЛЕМЕДИЦИНА    УСТРОЙСТВА    О КОМПАНИИ    КОНТАКТЫ

Андрей    Выход

Артериальное давление    Список | Диаграмма

Добавить    Печать    Экспорт в pdf    Экспорт на почту    Импорт    Удалить

7 дней    Весь день

<input type="checkbox"/>	Дата	Систолическое (верхнее значение)	Диастолическое (нижнее значение)	Пульс
<input type="checkbox"/>	01.09.2016 / 15:09	90 мм рт. ст.	65 мм рт. ст.	63 уд/мин
<input type="checkbox"/>	01.09.2016 / 14:59	120 мм рт. ст.	57 мм рт. ст.	69 уд/мин
<input type="checkbox"/>	01.09.2016 / 14:58	2047 мм рт. ст.	2047 мм рт. ст.	2047 уд/мин
<input type="checkbox"/>	01.09.2016 / 14:47	140 мм рт. ст.	65 мм рт. ст.	63 уд/мин
<input type="checkbox"/>	01.09.2016 / 14:38	129 мм рт. ст.	69 мм рт. ст.	71 уд/мин

Статистика измерений

Количество измерений    5