



**Инструкция по подключению тонометра  
UA-911BT(и весов UC-911BT)  
к мобильному приложению  
MyFitnessCompanion, работе с мобильным  
приложением MyFitnessCompanion и порталом  
(для смартфонов с ОС Android)**






# Содержание



1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market).....	3
2. Установка программы MyFitnessCompanion.....	4
3. Включение Bluetooth .....	5
4. Начало работы с MyFitnessCompanion.....	6
5. Главное окно мобильного приложения MyFitnessCompanion.....	7
6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT).....	8
7. Результаты работы прибора и программы после измерений.....	10
8. Просмотр обучающих видео.....	11
9. Подключение к порталу Health Vault.....	12




# 1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market)

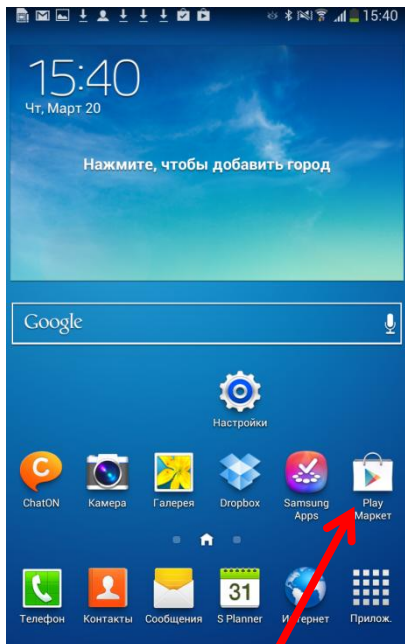


Открываем приложение Play Маркет

1

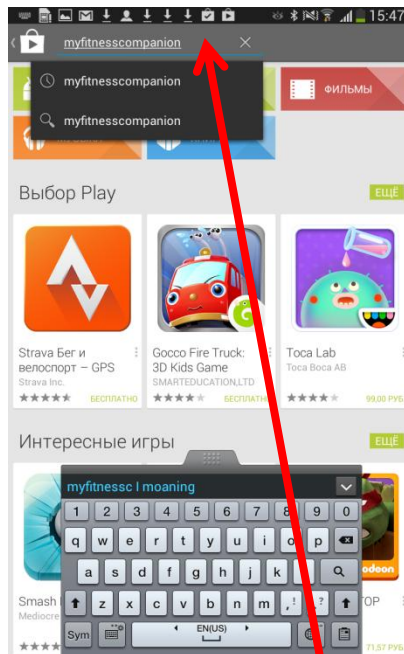

В поисковой строке набираем название программы MyFitnessCompanion

2

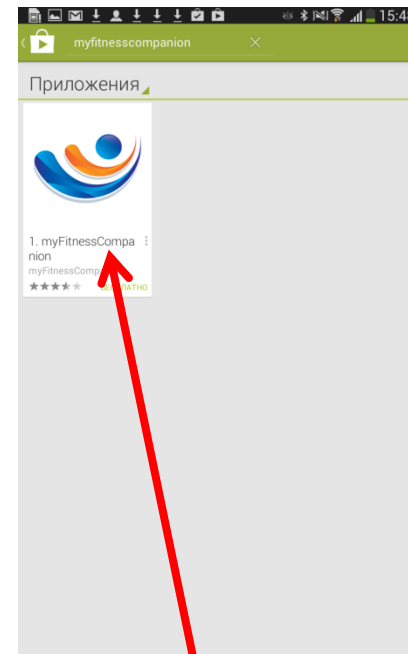


Выбираем установку приложения MyFitnessCompanion.  
**ВАЖНО!**

Если у Вас не появился значок приложения MyFitnessCompanion, то модель версии смартфона не поддерживает данное приложение.

3




## 2. Установка программы MyFitnessCompanion

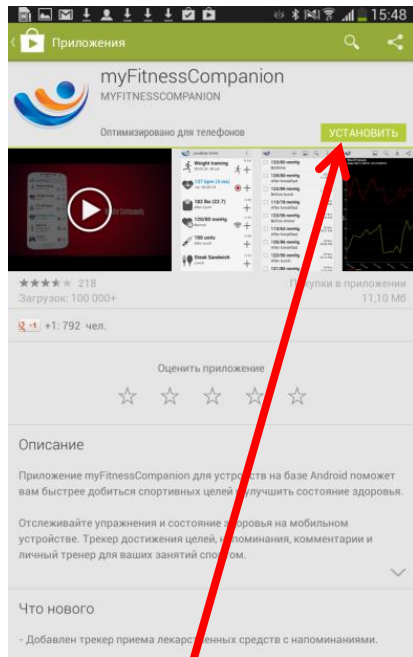


Выбираем пункт «Установить»

1

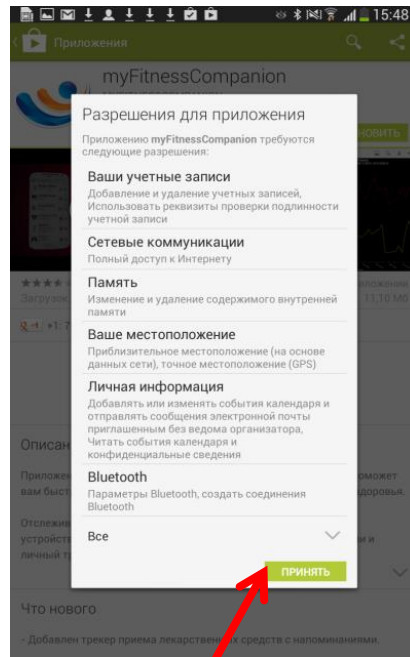


Play Market предлагает Вам принять разрешения для приложения. Выбираем пункт «Принять»

2

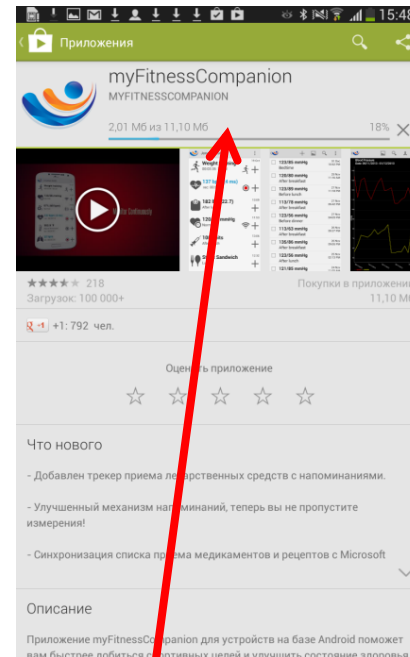

Начинается загрузка приложения

3

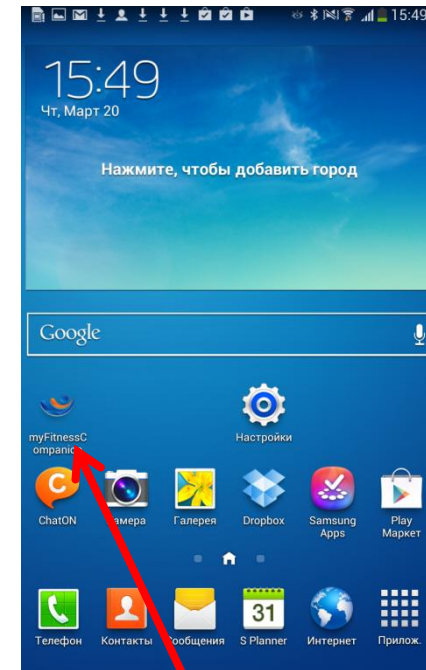


По окончании загрузки на рабочем столе телефона, должен появиться ярлык приложения MyFitnessCompanion

4




### 3. Включение Bluetooth

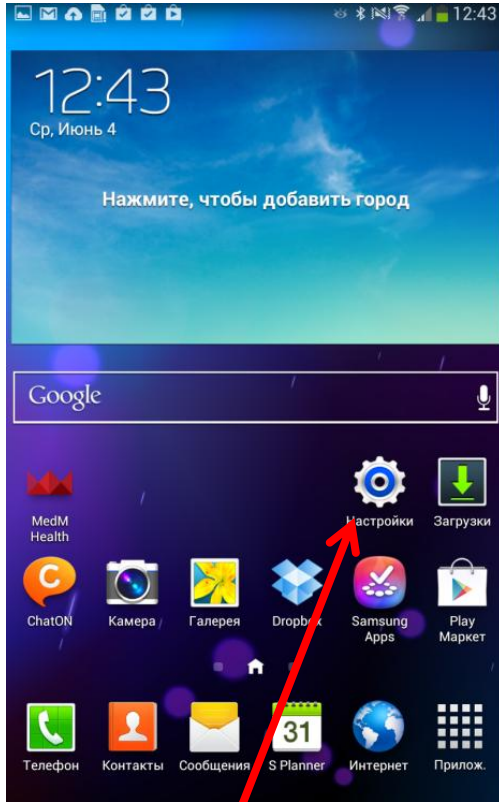


Заходим в пункт «Настройки»

1

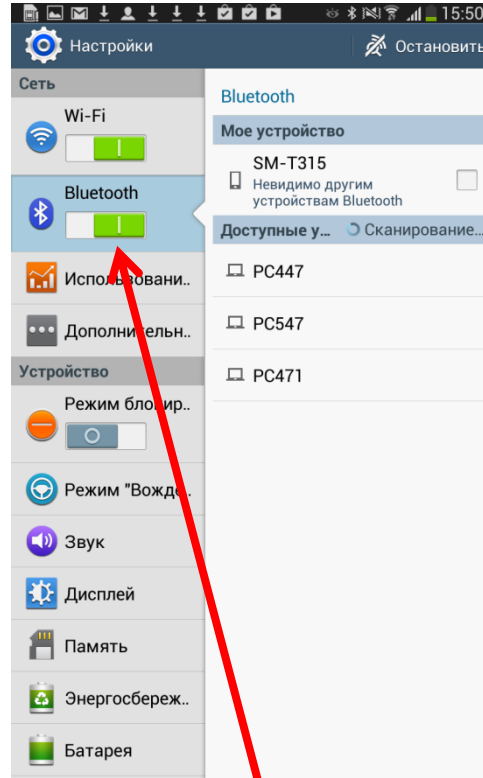

Делаем индикатор Bluetooth активным

2

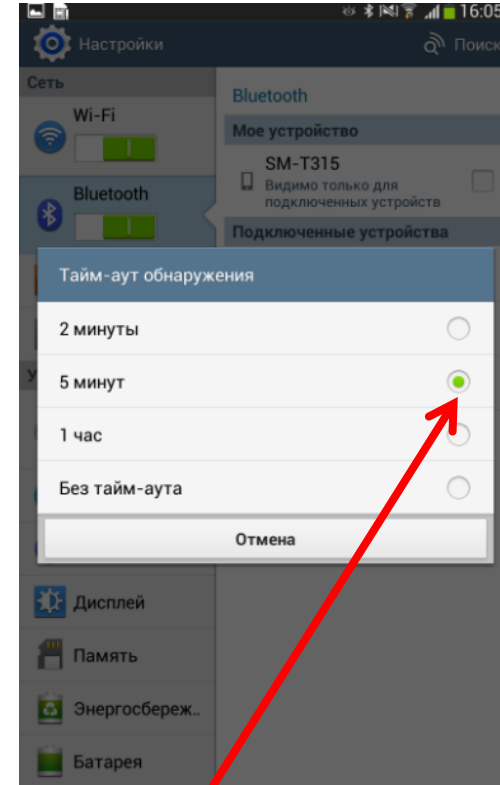


Для обеспечения надежности сопряжения тонометра со смартфоном установим Тайм-Аут обнаружения на минимум 5 минут. Для этого необходимо нажать кнопку «Меню» на Вашем смартфоне, выбрать пункт «Тайм-аут обнаружения» и поставить галочку на 5 минут

3




## 4. Начало работы с MyFitnessCompanion

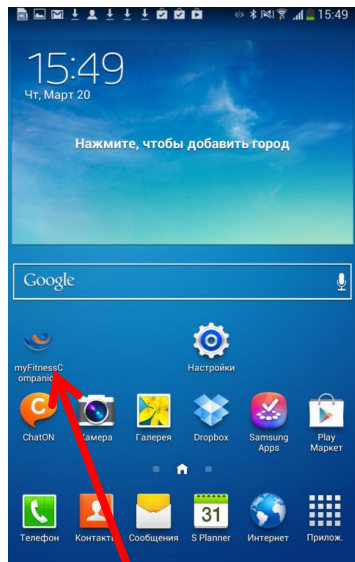


Запускаем приложение MyFitnessCompanion

1

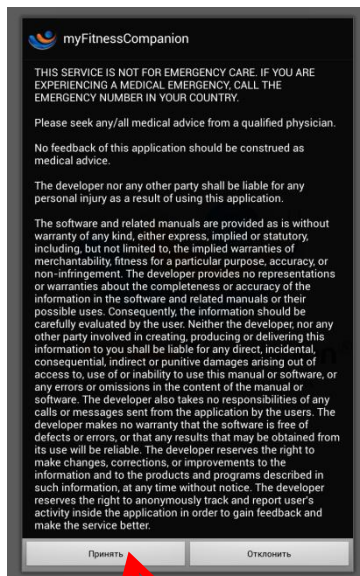


Для подтверждения лицензионных прав разработчиков выбираем пункт «Принять»

2

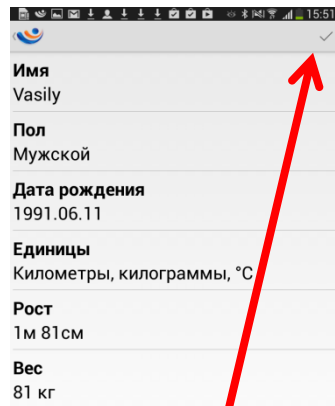


В окне «Персональные данные» в пустых строках вводим необходимую информацию и жмем галочку «Сохранить»

3

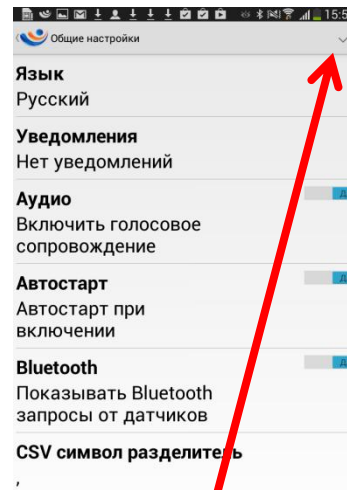

В окне «Общие настройки» выбираем необходимые Вам параметры и жмем галочку «Сохранить»

4

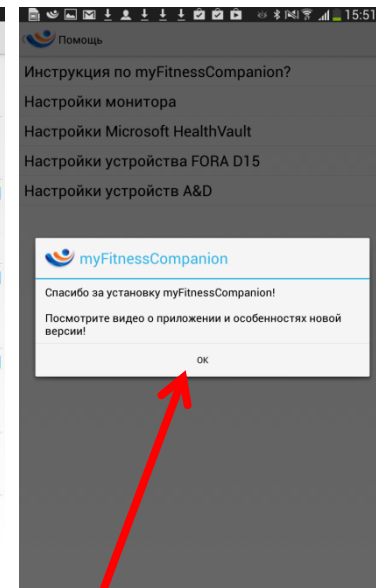

Программа MyFitnessCompanion готова к работе. После нажатия кнопки «Ок» Вы оказываетесь в окне «Помощь» где можете просмотреть обучающие видео на английском языке


5



# 5. Главная окно мобильного приложения MyFitnessCompanion

Учетная запись пользователя


Просмотр измерений и свойств прибора

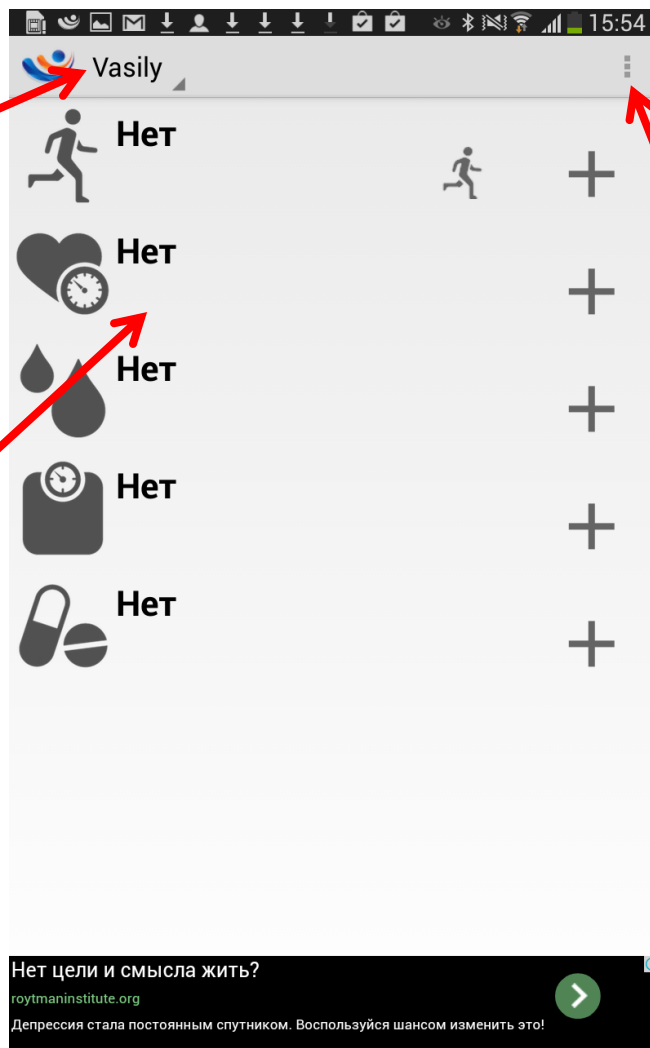

Меню настроек программы




# 6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

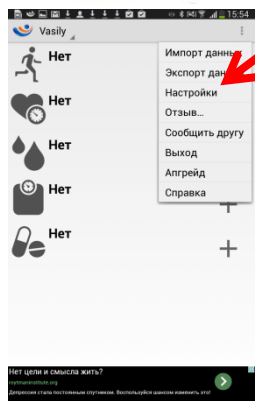


В разделе «Меню» выбираем пункт «Настройки»

1

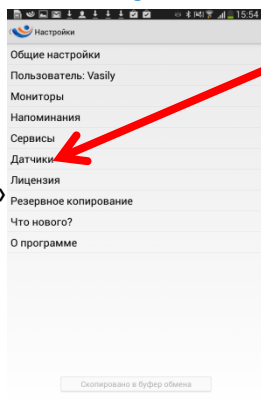


В разделе «Настройки» выбираем пункт «Датчики»

2

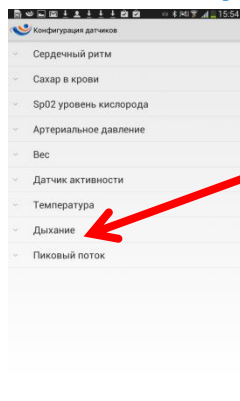


В разделе «Конфигурация датчиков» выбираем пункт «Артериальное давление»

3

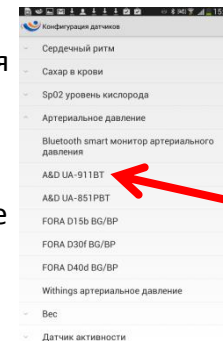


Из списка выбираем прибор A&D UA-911BT

4

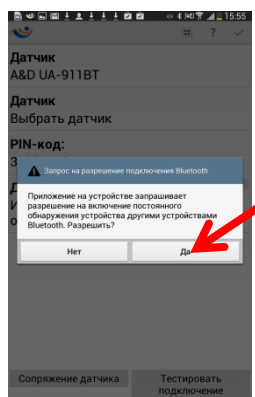

В окне «Запрос на разрешение подключения Bluetooth» нажимаем кнопку «Да»

5

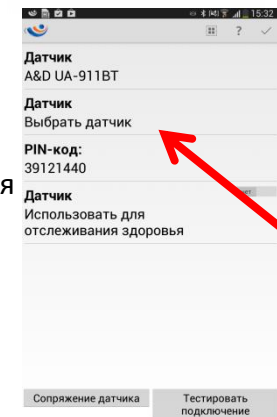


В меню прибора выбираем пункт «Датчик»

6




На обратной стороне тонометра находим идентификационный номер прибора

7

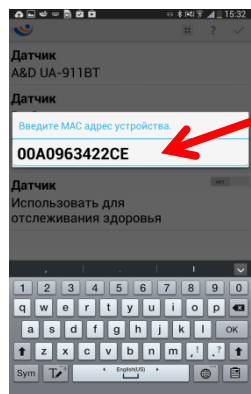

В открывшемся окне пишем идентификационный номер прибора

8

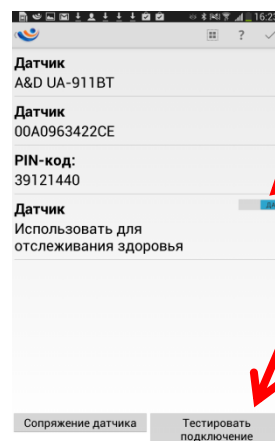

Ставим кнопку «Датчик. Использовать для отслеживания здоровья» в положении Да. После этого необходимо произвести измерение на тонометре. По окончании измерения сразу нажимаем пункт «Тестировать подключение»


9






# Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

**AND**  
Эй энд Ди, Япония

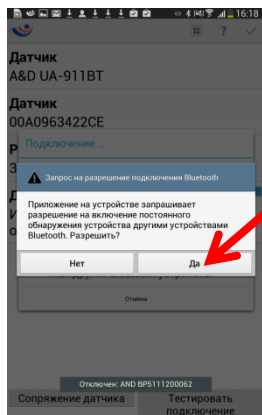


Подтверждаем запрос на включение модуля Bluetooth на приборе.

10

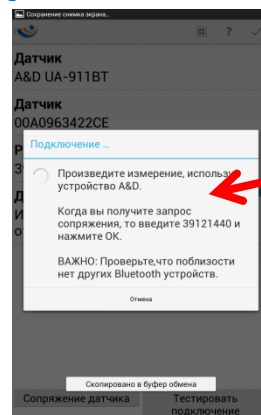


Ожидаем около 2х минут пока программа не добавит Ваш тонометр. В процессе подключения прибора смартфон может выдать сообщение «Прибор подключен» и «Прибор Отключен». Вне зависимости от вида сообщений ожидаем подключения без действий. Программа подключит тонометр автоматически. Если программа сделает запрос о вводе пароля, в строке ввода набираем 39121440.

11

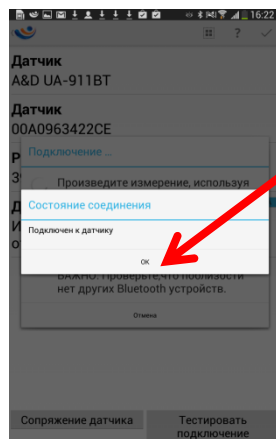

В случае успешного подключения прибора автоматически появится окно «Подключен к датчику»

12

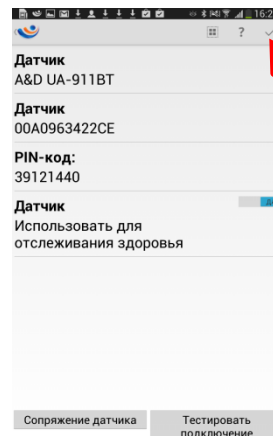


После подключения прибора к телефону выбираем пункт «Сохранить». После этого данные с тонометра после измерения будут автоматически приходить на Ваш смартфон. Так же в настройках Вы сможете настроить голосовое оповещение результатов измерений. В случае отсутствия подключения, попробуйте повторить все с 1 шага

13





## 7. Результаты работы прибора и программы после измерений

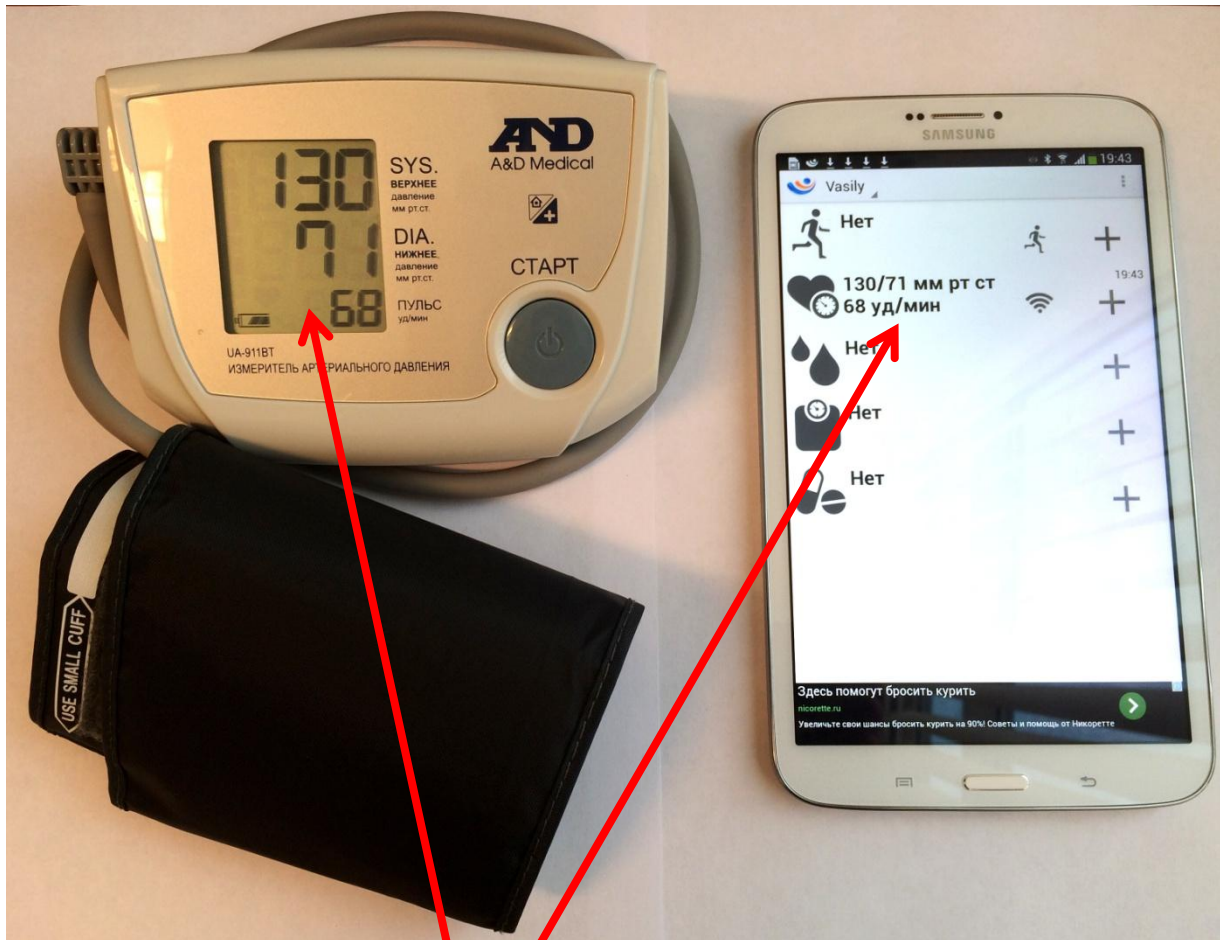


Передача данных с  
прибора на телефон

# 8. Просмотр обучающих видео

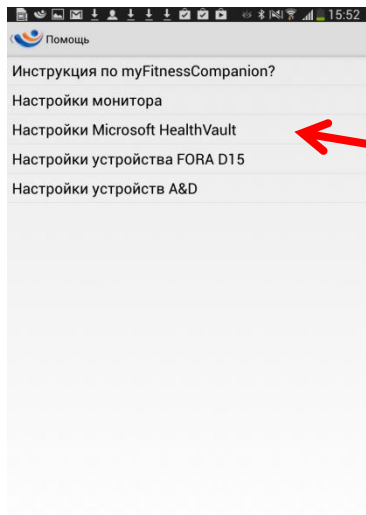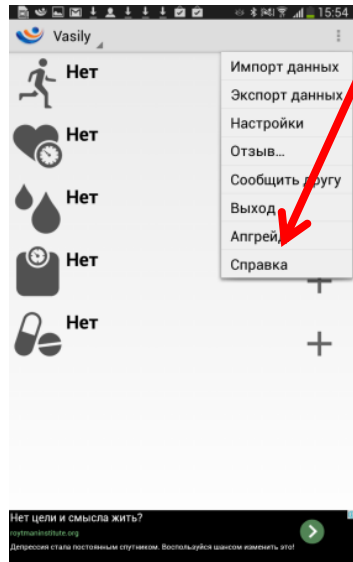




## 9. Подключение к порталу Health Vault

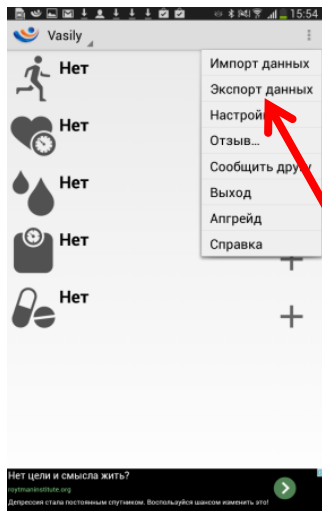


В разделе «Меню» экспорт данных

1

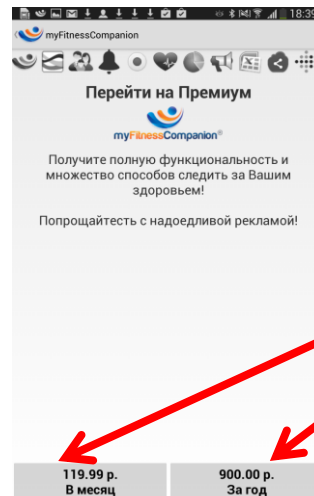


Выбираем подходящий для Вас тариф использования функции импорта данных. Инструкцию по настройке Вы сможете просмотреть по видео в разделе «Справка»

2

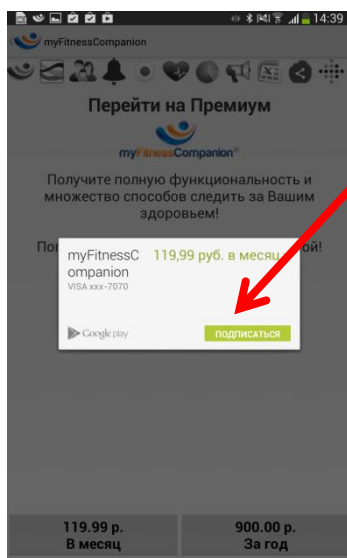

Если Вы выбрали один из тарифов, необходимо подписаться, используя Ваши персональные данные для покупок услуг в Google Play.

3

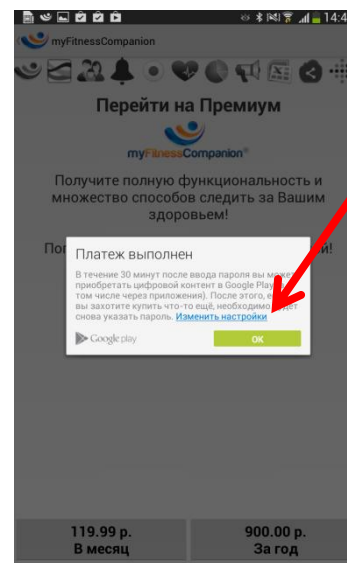


При успешном выполнении платежа Вы сможете пользоваться всеми возможностями приложения MyFitnessCompanion.

4




# 10. Подключение к порталу Health Vault

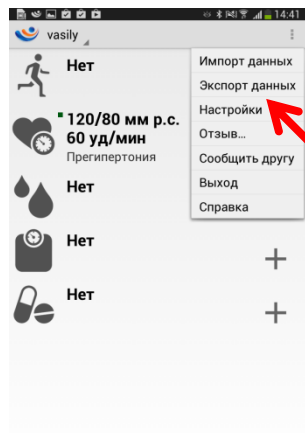


Заходим в «Главное меню». В пункте «Настройки» выбираем «Экспорт данных»

5

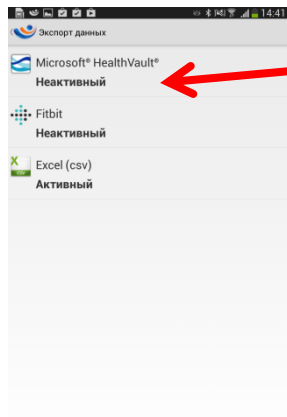


Выбираем пункт «Microsoft Health Vault»

6

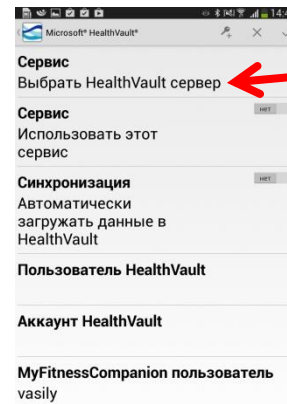


В меню «Microsoft Health Vault» нажимаем на сервис «Выбрать HealthVault сервер»

7

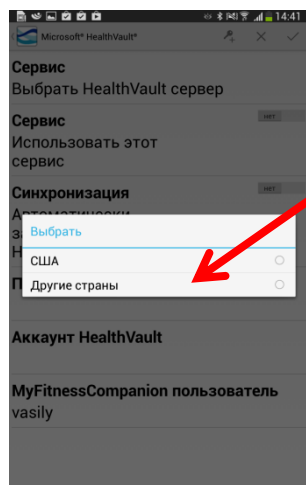


Выбираем пункт «Другие страны»

8

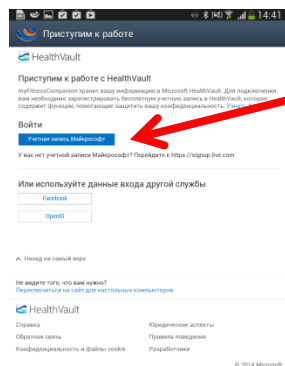

В пункте «Приступим к работе» необходимо ввести свои учетные данные для Microsoft Health Vault. Если вы не зарегистрированы, то Вы можете пройти регистрацию, перейдя по ссылке <https://signup.live.com> в этом же разделе меню.

9

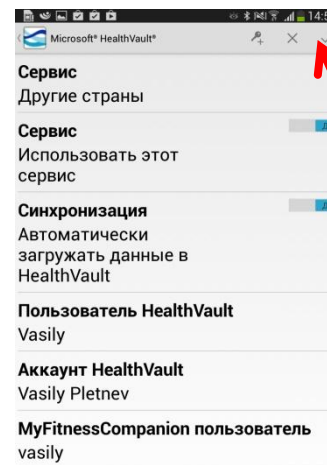

При успешной регистрации в меню «Microsoft Health Vault» в пунктах «Сервис» и «Синхронизация» ставим «ДА». Сохраняем данные

10



# 11. Подключение к порталу Health Vault

При успешном подключении и регистрации, данные с Вашего смартфона, подключенного к Интернет, то все полученные на смартфон измерения будут автоматически отправлены на Вашу персональную страницу на портале Health Vault.

Домашняя страница с основными пунктами

В разделе Профиль Вы сможете настроить Свои персональные данные

Список Ваших медицинских измерений

Приложения и устройства, используемые Вами

Экспорт Ваших данных в формате, удобном для печати

Печать Ваших измерений

Возможность добавить результаты измерения вручную

Результаты Ваших измерений

Текущие медицинские устройства, которыми Вы пользуетесь