



ПАМЯТКА

персоналу, проводящему обследование пациента с помощью ХЕЛИК® - аппарата

1. Перед началом обследования необходимо:


- убедиться в том, что пациент соблюдал ограничительные требования (см. Руководство по эксплуатации часть II, Инструкция по проведению дыхательного теста, стр.5-6) и может быть допущен к обследованию;
- проверить соединительный шланг (см. Руководство по эксплуатации часть I, Техническое описание, стр.4, рис.3), он должен быть сухим и чистым, при необходимости заменить (желательно заменить шланг после каждого пациента);
- удалить влагу и слюну из камеры сбора конденсата - съемный колпачок на нижней панели (см. Руководство по эксплуатации часть I, Техническое описание, стр.3, рис.1) сухим марлевым тампоном;
- проверить, чтобы под съемным колпачком горела лампочка, и ХЕЛИК®- аппарат издавал слабое жужжание;
- проверить значение $A_{\text{тек}} = 29-35 \text{ у.е.}$, при других значениях $A_{\text{тек}}$ ХЕЛИК®-аппарат выключить, снова включить для повторной продувки (значение $A_{\text{тек}}$ можно увидеть в программе Helic - Soft на ПК).

Внимание! Данные условия эксплуатации являются обязательными, их несоблюдение может привести к получению недостоверных результатов обследования и преждевременному выходу ХЕЛИК® - аппарата из строя.

2. Во время проведения процедуры обследования пациенту необходимо соблюдать следующие условия:

- мундштук зажать зубами перед ограничительным кольцом, дышать ровно, рот должен быть приоткрыт;
- голову держать немного приподнятой;
- если в ротовой полости накопилась слюна, можно вынуть

мундштук, проглотить слюну и поместить его обратно.

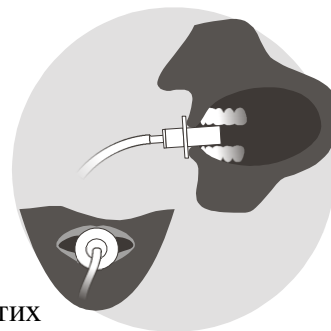

Внимание! Ознакомьте пациента с этими правилами до начала процедуры обследования. Персонал должен следить за соблюдением этих условий в течение всей процедуры обследования.

3. Если во время проведения процедуры обследования в шланг попала слюна необходимо:

- срочно заменить шланг;
- проверить камеру сбора конденсата на наличие слюны, при необходимости протереть сухим марлевым тампоном;
- процедуру обследования повторить через три часа или на следующий день.

Внимание!

После проведения последнего обследования необходимо оставить ХЕЛИК® – аппарат включенным для продувки в течение 5 мин