



Памятка для врача по использованию AMA RUT Pro

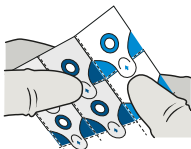

Согните блок по линиям перфорации.

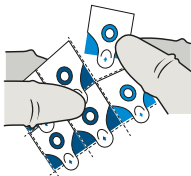

Отделите один сегмент для исследования.




Откройте защитную плёнку, но не тяните сильно, чтобы её не оторвать. Поместите биоптат на белый чувствительный элемент, а не за его пределы.



Поместив биоптат, аккуратно пригладьте защитную пленку пальцем по периметру изделия.




Зафиксируйте пленку по линии выреза. Фиксация необходима для сохранения продуктов реакции в ячейке экспресс-теста.

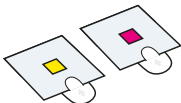

Оцените результат исследования с обратной стороны через **5 минут**.

Перед эксплуатацией экспресс-теста ознакомьтесь с Инструкцией по применению.

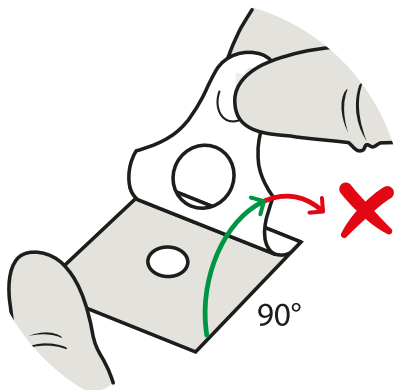

Не заламывайте защитную пленку при открывании экспресс-теста.