

ООО «АМА»

ООО «АМА»



Победитель конкурсов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на получение грантов по программам «Интернационализация» и «Коммерциализация» в 2012, 2015 и 2019 годах.



НАГРАДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА КАЧЕСТВО

2017 2018 2021



НАГРАДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА КАЧЕСТВО
2024

Призер конкурса «За качество товаров (продукции), работ и услуг» Правительства Санкт-Петербурга в номинации Промышленные организации (третье место в 2017 году и второе место в 2018 году). Лауреат премии 2020 году 1 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство». Диплом победителя в номинации «Экспортер года в сфере медицины и фармацевтики 2023». Награда Правительства Санкт-Петербурга – почетный знак «За качество товаров (продукции), работ и услуг» 1 место в номинации «Лучшее малое промышленное предприятие с численностью до 100 работников» в 2021 и 2024 году.

С 2011 года первая в России интегрированная система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 13485:2016

* Товарные знаки AMA и AMA RUT принадлежат Ассоциации Медицины и Аналитики

www.amarut.pro | www.amarut.expert



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6, лит. Е, пом. 1Н
Тел: 8 800 2222-840, 8 (812) 380-7699, 8 (812) 321-7501
E-mail: info@amamed.ru; www.amamed.ru

АМА RUT Pro и АМА RUT Expert

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ И ЭНДСКОПИСТОВ







ПОЧЕМУ AMA RUT Pro и AMA RUT Expert — ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ БЫСТРОГО УРЕАЗНОГО ТЕСТА?

Новые тесты AMA RUT являются селективными уреазными тестами. Их отличие от обычных быстрых уреазных тестов — в разделении ферментативной и индикаторной реакций. Это достигается за счет усовершенствованной конструкции теста с мембраной.

КОНСТРУКЦИЯ ТЕСТА AMA RUT

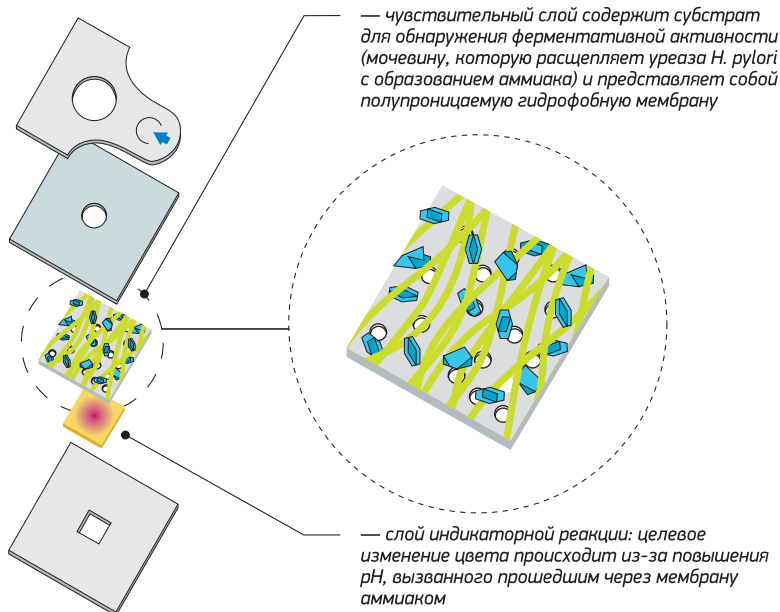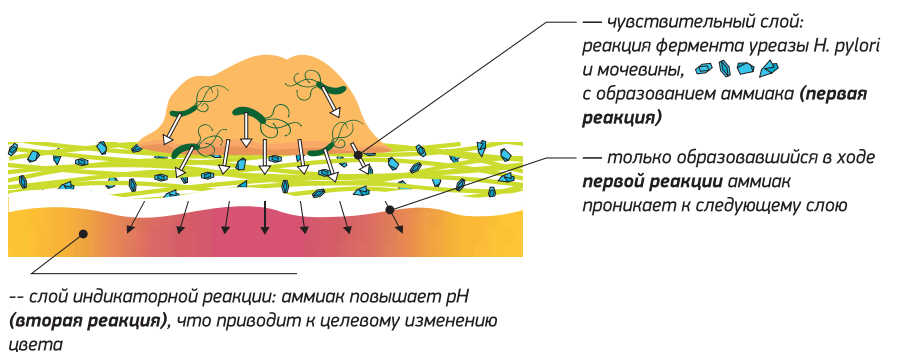

ПОЧЕМУ ВАЖНО РАЗДЕЛЯТЬ ЭТИ ДВЕ РЕАКЦИИ?



— Достигается максимальная специфичность: тест сработает только на уреазу, а не на pH биоптата (может меняться на фоне приема медикаментов, применения лидокаина, рефлюкса желчи, недостатка простагландина, особенностей питания, онкологии и других факторов). Только уреазы, если она содержится в биоптате, вступит в реакцию на первом слое теста, и образовавшийся аммиак сможет проникнуть сквозь мембрану для запуска индикаторной реакции.

Так, тест показывает результат специфично к уреазе *Helicobacter pylori*, что подтверждено исследованиями на бактериальных культурах в Институте Пастера. Диагностическая специфичность в исследованиях с различными референсными методами составляет от 99% до 100%.

— Повышается чувствительность: разделение при помощи мембраны позволило подобрать компоненты каждого из слоев так, чтобы реакции в тесте проходили в полной мере и как можно быстрее.

Порог чувствительности составляет 10^4 КОЕ *Helicobacter pylori* в зависимости от штамма культуры, что соответствует лучшим мировым образцам. Клиническая чувствительность по данным исследований составляет от 98% до 99%.



— Легко заметить изменение окраски теста: этому не мешает ни биоптат, ни пятно смачивания от него, потому что мембрана отделяет слой с биоматериалом от индикаторного слоя.

Селективные уреазные тесты с разделением слоев отвечают современным мировым требованиям диагностики *Helicobacter pylori*. С момента официального анонса на международной выставке Medica в 2015 году, новые тесты AMA RUT нашли применение в 42 странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Теперь мы рады предоставить возможность попробовать новинку отечественным специалистам. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9301 от 10.03.2023