

ПАЦИЕНТУ

ЛАКТОФА H_2 — водородный дыхательный тест

может быть использован для диагностики заболеваний кишечника у пациентов разных возрастов, в том числе у детей грудного возраста.

Для получения достоверных данных пациент должен быть готов к обследованию, поэтому необходимо соблюсти следующие требования:*



За 10 часов (как минимум) до начала проведения теста необходимо воздержаться от приёма пищи. В течение этого времени можно пить только воду.



Последний приём пищи должен быть лёгким. Не употреблять такие продукты как лук, чеснок, капуста, солёная капуста, бобовые.



В день исследования можно принимать лекарственные препараты за исключением витаминов, слабительных и антибиотиков.



Перед обследованием пациент не должен проявлять физическую активность.



Не жевать жевательную резинку за 12 часов до начала проведения теста.



Не курить за 12 часов до начала проведения теста.



Нельзя использовать зубопротезный клей пациентам, использующим зубные протезы.



Перед проведением теста рекомендуется почистить зубы.

**все эти требования не относятся к детям грудного возраста*

Безусловные противопоказания для приема нагрузки:

- Анамнестические симптомы наследственной непереносимости фруктозы (противопоказан тест с фруктозной нагрузкой, тест с сорбитольной нагрузкой)
- Анамнестические симптомы неустановленной гипогликемии (возникающей после приёма пищи)

Относительные противопоказания:

- Приём антибиотиков (менее чем 4 недели назад)
- Колоноскопия (менее чем 2 недели назад)
- Ирригоскопия (менее чем 2 недели назад)
- Илеостомия

**ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ
ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ**

Как проводится водородный дыхательный тест с ЛАКТОФАН2

1. Подготовка к тестированию



Взвесить пациента



Выбрать нагрузку



Развесить нагрузку



Приготовить раствор

2. Проведение тестирования



Определить
исходный уровень
водорода в воздухе,
выдыхаемом
пациентом



Дать пациенту
выпить нагрузку



Повторно
измерить уровень
водорода в
выдыхаемом воздухе
через 30 мин.



Повторять
измерения каждые
30 мин. в течение
2-х часов.
Оценить результат