

Памятка медицинскому персоналу по проведению процедуры обследования с помощью прибора ЛАКТОФАН2

Минимальное время обследования 30 мин.

Максимальное время обследования 120 мин.

Промежуток между выдохами пациента 30 мин.

Первый выдох пациента проводится натощак (базальный), второй (после принятия нагрузки) и последующие выдохи – нагрузочный.

Алгоритм действий:

1. Включите прибор.
2. Выберите пациента (например, № 1)
3. Выберите нагрузку (**Внимание!** при проведении обследований на СИБР с Lactulose выберите автоматический режим выставления времени 10 Customer (30 минут)).
4. Вставьте одноразовый мундштук в переходник, затем вставьте переходник в прибор.
5. Пациенту: сделайте глубокий вдох, максимально задержите дыхание. Зажмите мундштук губами плотно и медленно выдохните (базальный выдох), как можно дольше.
6. Подождите появления результата обследования на экране, сохраните результат.
7. Выньте переходник с мундштуком из прибора.
8. Дайте пациенту выпить нагрузку.
9. Установите таймер.
10. После восстановления датчика проведите обследование следующего пациента (при необходимости).
11. Через 30 мин прибор подаст сигнал: пациенту № 1 необходимо сделать нагрузочный выдох.

Интерпретация результата обследования:

Если разница между нагрузочным и базальным выдохами ≥ 20 ppm результат считается положительным, обследование можно закончить.

Если разница между нагрузочным и базальным выдохами < 20 ppm результат считается отрицательным. Пациент делает выдохи каждые 30 мин до появления первого положительного результата.